

| | |
|----------|-------------|
| Tähis | VGH-7.1.5.1 |
| Viide | VGH-07.1 |
| Versioon | 01 |

Uriini kogumise lühijuhend Greiner BIO-ONE vaakumsüsteemiga

Valmista ette uriinitops, uriinikatsuti.

Uriinitopsile kirjuta patsiendi nimi, uriinikatsut markeeri eHL-i vötkoodiga.
Mediposti kasutajad: uriinitopsile kirjuta patsiendi nimi, markeeri uriinikatsut vötkoodiga.



Uriini kogumine

Pese hoolikalt käed,
seejärel genitaalpiirkond.
Ära kasuta pesemisvahendit.
Kuivata puhta käterätiga.



Keera laht i uriinitopsi kaas.
Aseta kaas kõ rvale nii,
et kaane põhjal ol ev imemis-
otsik jääks su unaga ülespidi.



TÄHELEPANU!

Otsikut mitte puutada!



| | |
|----------|-------------|
| Tähis | VGH-7.1.5.1 |
| Viide | VGH-07.1 |
| Versioon | 01 |

Esmalt urineeri natuke WC-potti.
Seejärel kogu uriinitopsi
umbes 50 ml keskjoa uriini.
Lõpuosa uriin urineeri taas WC-potti.



Aseta kaas uriinitopsile ja
keera kinni.
Eemalda uriinitopsil kaanel
olev kaitsekleeps.



Suru uriinikatsut kaanes oleva
avause põhja. Hoia katsutit kuni
uriinivool katsutisse lõpeb.
Eemalda katsut avausest.



Sega u riinikatsutit
paar korda



Aseta kaitsekleebis tagasi
kaanel olevale avausele.
Saada uriinitops
jäätmekäitlusse.



Uriinikatsuti transport

Saada uriinikatsut laborisse. Uriin ei tohi toatemperatuuril seista üle kahe tunni.